



SiDLY Care PRO

*Guida
all'avviamento veloce*



AURORA
WE FOR YOU

SiDLY Care PRO GUIDA ALL'AVVIAMENTO VELOCE

Questo non è un manuale d'uso. Il manuale d'uso ufficiale si trova all'interno della confezione del prodotto.

L'elenco di seguito costituisce delle semplici indicazioni d'uso.

Ricaricare la batteria

appoggiare il dispositivo sulla base di ricarica a induzione (che dovrà essere collegata alla presa di corrente). Il cerchio rosso del caricatore dovrà essere in linea con il cerchio rosso del dispositivo (Fig. 1).

Bracciale carico

Attendere per 2,5/3 ore fino a che la batteria non sia completamente carica. Il dispositivo darà un segnale vocale quando è carico. Assicurarsi che il bracciale sia carico. Se così non fosse, ricaricarlo ponendolo sulla base di ricarica ad induzione ed attendere 2,30 ore circa.

Indossare il bracciale,

assicurarsi che venga indossato aderente e a circa 2-3 cm dal polso (polso sinistro raccomandato Fig.2).

Pulsante" SOS"

Premere il pulsante" SOS" per circa 2 secondi (Fig.3), fino a che il LED rosso non si accenda, in modo che possa calibrarsi e sincronizzarsi con il server. (Questa misura serve anche per confermare la connessione GSM). Se si riceve il messaggio "scarsa qualità o GSM assente" trovare una posizione con maggiore copertura GSM.

Rilevazione parametri vitali

Condizioni necessarie

per la misurazione dei parametri vitali:

- Batteria non scarica
- Bracciale indossato correttamente
- Utente in posizione immobile
- Sufficiente connessione GSM

Tempo di misurazione:

- Durata: massimo 60 secondi (Fig.4)
- Frequenza: impostata dal care giver tramite la piattaforma
– minimo 15 secondi, massimo 4 ore

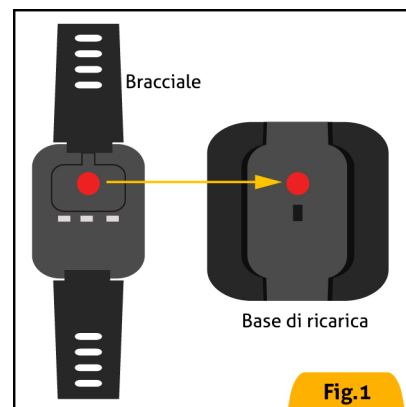


Fig.1

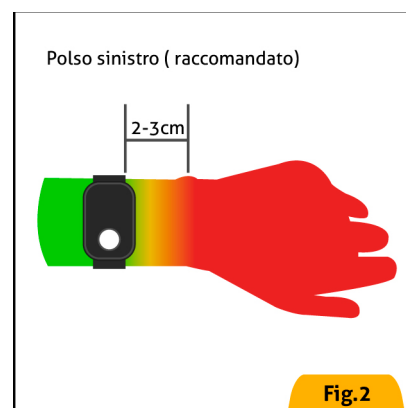


Fig.2

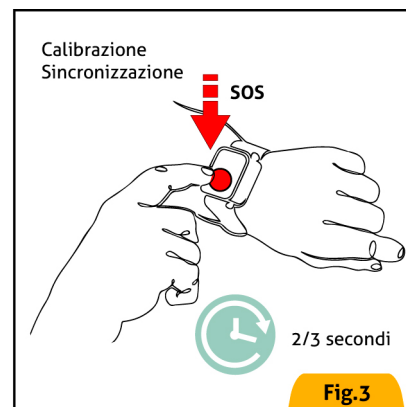


Fig.3

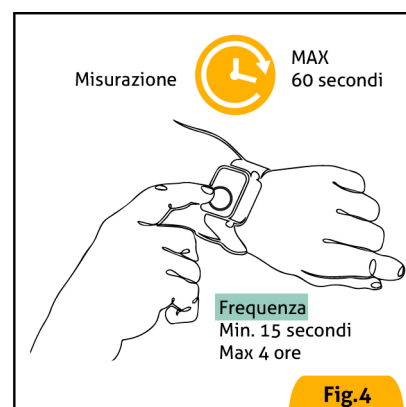


Fig.4

Tolleranza e qualità delle misurazioni:

- Battito cardiaco: ± 3 bpm
- SpO2: $\pm 3\%$
- Nel caso in cui la qualità della misurazione sia troppo bassa, la misurazione non verrà mostrata sulla piattaforma. Il dispositivo ritenterà una nuova misurazione appena rileverà l'utente come immobile. Nessuna indicazione luminosa sarà presente in questo caso.
- Il dispositivo tenterà una nuova misurazione fino a che non andrà a buon fine o fino alla prossima sincronizzazione (impostata dalla consolle).

N.B.: PER UNA PIÙ ACCURATA MISURAZIONE SI RICHIEDE:

- Di verificare che il bracciale sia aderente al polso (stretto ma comodo. Rispettare la distanza illustrata in Fig.5).
- Che il dorso del bracciale sia pulito (utilizzare un batuffolo leggermente bagnato con alcool Fig.5).
- Che non vi siano elementi che possono ostacolare la rilevazione del bracciale (creme, sudorazione, peluria consistente, ecc. Fig.5)

Qualunque movimento durante la rilevazione dei parametri può compromettere i risultati rilevati o indurre il sistema a scartare il dato.

In caso di caduta

l'algoritmo "legge" l'accelerazione del bracciale, la caduta e il mancato movimento per circa 10/20 secondi.

È bene sapere:


- La caduta non verrà rilevata se l'utente si alza molto in fretta o non resta immobile.
- È necessario impostare il livello più adatto di sensibilità del dispositivo tramite la piattaforma (livello 3 raccomandato)

Ricaricare la batteria


appoggiare il dispositivo sulla base di ricarica a induzione (che dovrà essere collegata alla presa di corrente). Il cerchio rosso del caricatore dovrà essere in linea con il cerchio rosso del dispositivo. Attendere per 2,5/3 ore fino a che la batteria non sia completamente carica. Il dispositivo darà un segnale vocale quando è carico (Fig.6).



PER UN'ACCURATA MISURAZIONE

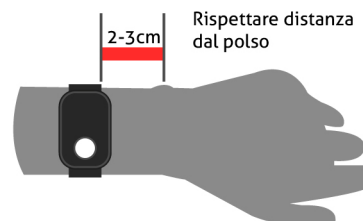

Pulire dorso bracciale

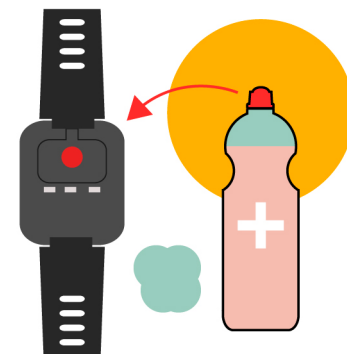

Non usare creme prima della misurazione

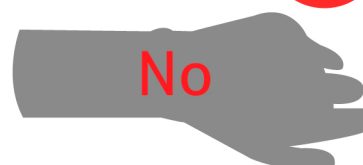


Fig.5



Fig.6

Comunicazione

- Il dispositivo comunica via SIM card inserite, grazie al segnale GSM
- In caso di segnale GSM debole, il dispositivo archiverà fino a 20 misurazioni nella sua memoria – verranno tutte sincronizzate appena il segnale di connessione sarà sufficiente (Fig.7)
- Più il campo di connessione intorno al dispositivo è alto e meglio è – selezionare una rete che garantisca una buona connessione – la comunicazione del bracciale
- È possibile connettersi alla WiFi in assenza di campo GSM
- La funzione va impostata dalla consolle del dispositivo. Il dispositivo prova prima a connettersi via GSM e qualora la funzione Wi-Fi sia stata attivata, ed in mancanza di copertura GSM, prova la connessione via Wi-Fi. Nel caso di mancanza di copertura GSM un messaggio vocale indicherà "nessuna copertura GSM".

Segnali luminosi – in carica (Fig.8)

- Rosso (lampeggiante rapidamente) batteria inferiore al 15%, c'è bisogno di ricaricare la batteria
- Rosso e verde (costanti) – in carica
- Verde (costante) – carica completa apparato in funzione




Segnali luminosi – operazioni (Fig.10)

- Verde (lampeggiante) – opera correttamente
- Rosso (costante) – invio in corso di "SOS" / rilevata caduta
- Rosso (lampeggiante) – basso livello di carica della batteria
- Verde -Giallo (lampeggiante)-braccialeto carico-Bassa copertura GSM
- Rosso-Giallo (lampeggiante)-basso livello batteria e bassa copertura GSM
- Blue (lampeggiante)-sincronizzazione con il server-aggiornamento software

Importante: se il LED sulla base di ricarica è verde costante (batteria carica) e non ci sono altri segnali luminosi sul bracciale, il dispositivo potrebbe essere spento. Premere il pulsante "SOS" per 10 secondi in modo da accendere il dispositivo (Fig.9).

Spegnimento dispositivo

Con il dispositivo sulla basetta di ricarica e luce verde e rossa contemporaneamente sul bracciale, premere leggermente il pulsante SOS fino a quando non emette 4 bip successivi (Fig.11).

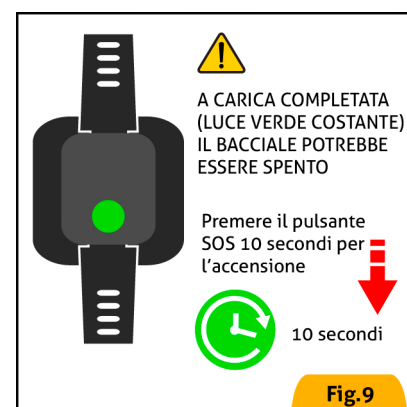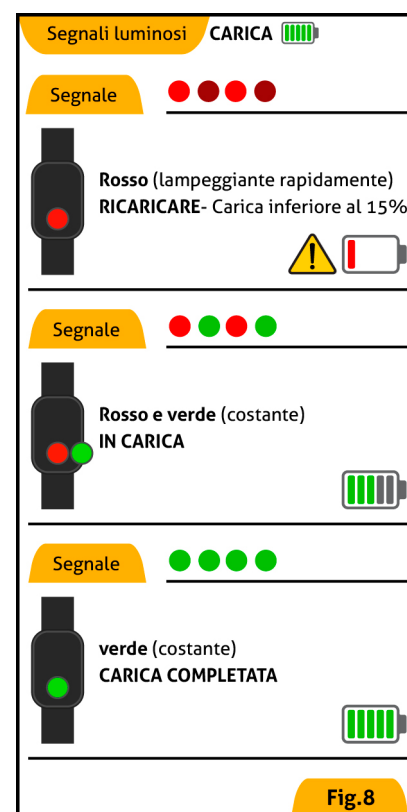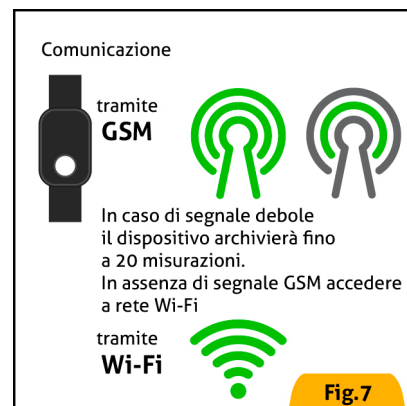

Segnali luminosi OPERAZIONI

Segnale



Verde (lampeggiante)
IL SISTEMA OPERA
CORRETTAMENTE

Segnale



Rosso (lampeggiante)
BASSO LIVELLO
DI BATTERIA

Segnale



Rosso e giallo (lampeggiante)
BASSO LIVELLO DI BATTERIA
BASSA COPERTURA GSM

Segnale



Rosso (costante)
INVIO IN CORSO DI " SOS " /
RILEVATA CADUTA

Segnale



Verde e giallo (lampeggiante)
BASSA COPERTURA
GSM

Segnale



Blu (lampeggiante)
SINCRONIZZAZIONE CON SERVER
AGGIORNAMENTO SOFTWARE

Fig.10

MANUTENZIONE



- Rimuovere il bracciale surante il bagno o la doccia



- Nel caso in cui il dispositivo, nonostante una buona connessione GSM, non dovesse riuscire a procedere con la misurazione per 1 ora, assicurarsi che le lenti del sensore (sotto il dispositivo) siano pulite. Se non sono pulite, pulirle con un panno morbido, privo di lanuggine o con una salvietta disinfettante. Le lenti non devono essere graffiate o danneggiate.



Spegnimento

con il bracciale
sulla base di ricarica
premere leggermente
il pulsante SOS
fino a quando il
dispositivo non
emette 4 bip.



4 Bip

Fig.11